

INIST COVID-19 IgM/ IgG Rapid Test Kit



✓ Features

Schnell

Testergebnis nach **10 Minuten**



Test

Mit Vollblut, Serum oder Plasma (10 µL Probenmenge)



EINFACH

Kein Spezialwissen erforderlich.



EXAKT

Sensitivität: 90.24%, Spezifität: 97.82%
Gleichzeitige Testung auf IgM/IgG

INIST COVID-19 **IgM/ IgG Rapid** liefert klinische Entscheidungshilfen bei Patienten mit Verdacht auf eine COVID-19 (Coronavirus)-Infektion. INIST COVID-19 **IgM/ IgG Rapid** ist ein lateral-flow-chromatographischer Immunoassay zum Nachweis von Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Virus.

✓ Performance

<Gesamtergebnisse klinische Überprüfung>

Methode		Allplex™ 2019-nCoV Assay		
		Positiv	Negativ	Gesamt
Absoludy COVID-19 IgM/IgG Rapid (INIST COVID-19 IgM/IgG Rapid)	Positiv	37	2	39
	Negativ	4	90	94
Gesamt		41	92	133


Klinische Sensitivität: 90.24 % (37/41)

Klinische Spezifität: 97.82% (90/92)

✓ Testablauf


① Probe entnehmen

Tauchen Sie das Probenentnahmeröhrchen in die Probe (Serum, Plasma oder Vollblut) und entnehmen Sie die Probe (10 μ l)

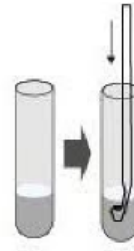

② Probe aufbringen

Geben Sie 10 μ l der Probe (Serum, Plasma oder Vollblut) mit einem Probenentnahmeröhrchen oder einer Mikropipette in die Probenvertiefung.

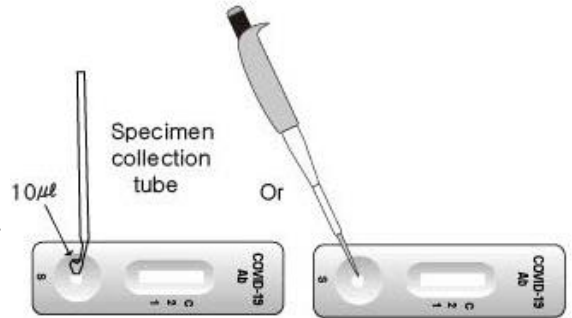

③ Probenverdünner aufbringen



3 Tropfen (100 μ l) des Probenverdünners in die Probenvertiefung geben



④ Ablesen & Interpretieren

Ergebnisse nach 10-15 Minuten ablesen. (Nach 20 Minuten werden Ergebnisse ungültig)

✓ Ergebnis & Auswertung

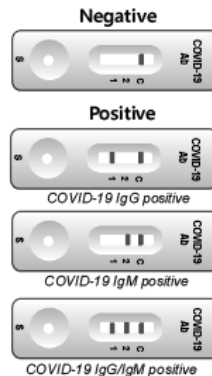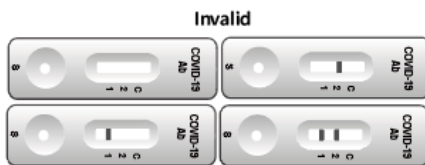

✓ Bestellinfo

Model No.	IgM/ IgG RAPID 25-er Pack	IgM/ IgG RAPID 5-er Pack	IgM/ IgG RAPID 1-er Pack
Produktklasse	Rapid Kit		
Beschreibung	COVID-19 IgM/ IgG Rapid Antibody-Schnelltest		
Contents	25-er Pack, Box bestehend aus: 1 Beilagzettel (mehrsprachig) 25 Test-Strips 1 Verdünnungslösung 25 Blutentnahme-Sets (je 25 Alkoholtupfer, Lanzetten und Blutauffangröhrchen)	5-er Pack, Box bestehend aus: 1 Beilagzettel (mehrsprachig) 5 Test-Strips 1 Verdünnungslösung 5 Blutentnahme-Sets (je 5 Alkoholtupfer, Lanzetten und Blutauffangröhrchen)	1er Pack, Box bestehend aus: 1 Beilagzettel (mehrsprachig) 1 Test-Strip 1 Verdünnungslösung 1 Blutentnahme-Sets (je 1 Alkoholtupfer, Lanzetten und Blutauffangröhrchen)

Distributed By

PMed-Services GmbH

Hutweide 10, 91220 Schnaittach, Deutschland
e-mail: reinhold@pmed-services.online; Tel.: +49(0)171-2368871 Vertrieb in D-A-CH und weiteren Ländern

500, Sinnae-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Südkorea

Manufactured By

#1303, Digital Empire "B" Simin-daero 383, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do 14057 Republic of Korea