

INIST COVID-19 Ag Rapid

CE-geprüft.
BfArM-registriert und in
Deutschland erstattungsfähig



FEATURES

SCHNELL

Testresultat in 15 Minuten

EXAKT

Sensitivität: 100%,
Spezifität: 100%

EINFACH

Kein Spezialwissen erforderlich.
Nasopharyngeale Abstrichprobe



INIST COVID-19 Ag Rapid ist für den Nachweis von spezifischen Antigenen gegen das SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) bei einer Infektion in menschlichen Nasopharynx- und Oropharynx-Proben.

PERFORMANCE


<Gesamtergebnisse klinische Überprüfung>

Methode		Allplex™ 2019-nCov Assay		
		Positive	Negative	Total
INIST COVID-19 Ag Rapid	Positiv	50	0	50
	Negativ	0	92	92
Gesamtl		50	92	142


Klinische Sensitivität: 100%
Klinische Spezifität: 100%

TESTABLAUF

- 1 Geben Sie die Tupferproben in die Extraktionspufferlösung wie unten dargestellt.
- 2 Drehen Sie den Tupfer mehrmals und entfernen Sie den Tupfer langsam, während Sie ihn an den Seiten des Röhrchens abdrücken.
- 3 Nachdem Sie die neue Filterdüsenkappe auf das Röhrchen aufgesetzt haben, geben Sie 4 Tropfen (100 µL) in die Probenvertiefung des Teststrips, indem Sie das Röhrchen senkrecht nach unten halten.
- 4 Lesen Sie die Ergebnisse exakt nach 15 Minuten ab (nicht später).

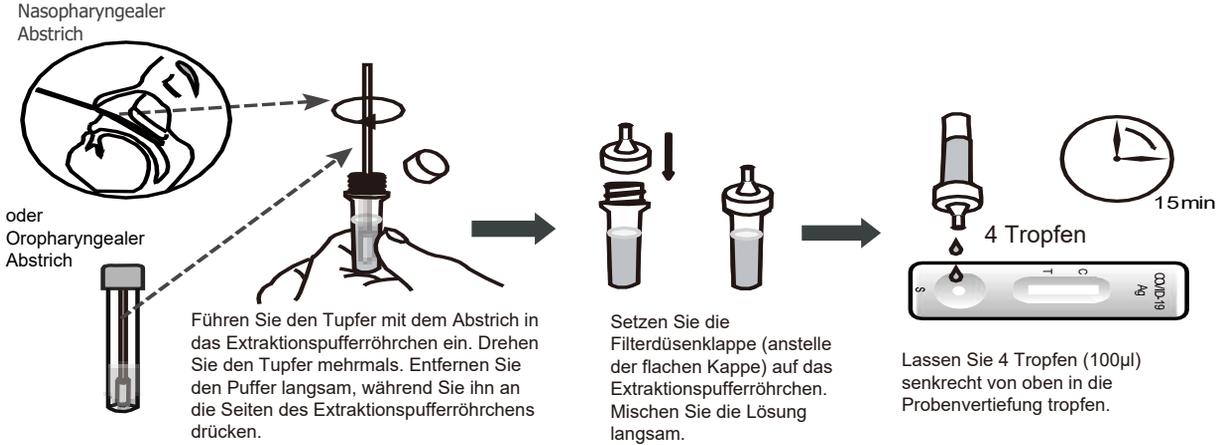

RESULTATE

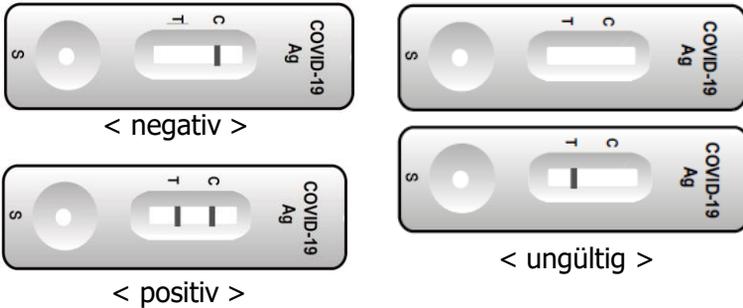

BESTELLINFO

Model No.	COVID-19 Ag RAPID 20-er Pack	COVID-19 Ag RAPID 5-er Pack	COVID-19 Ag RAPID 1-er Pack
Produktklasse	Rapid Kit		
Beschreibung	COVID-19 Ag RAPID Antigen-Schnelltest		
Contents	20-er Pack, Box bestehend aus: 1 Beilagzettel 20 Test-Strips 20 Sterile Tupfer zur Probenentnahme 1 Reagenzienhalter für 20 Röhrchen 20 Röhrchen m. Extraktionspufferlösung 20 Filterdüsenkappen	5-er Pack, Box bestehend aus: 1 Beilagzettel 5 Test-Strips 5 Sterile Tupfer zur Probenentnahme 5 Röhrchen m. Extraktionspufferlösung 5 Filterdüsenkappen	1er Pack, Box bestehend aus: 1 Beilagzettel 1 Test-Strip 1 Steriler Tupfer zur Probenentnahme 1 Röhrchen m. Extraktionspufferlösung 1 Filterdüsenkappen

Distributed By

PMed-Services
GmbH

Hutweide 10, 91220 Schnaittach, Deutschland
e-mail: reinhold@physiomed-services.online; Tel.: +49(0)171-2368871
Vertrieb in D-A-CH und weiteren Ländern

INIST

500, Sinnae-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Südkorea

Manufactured By

ABSOLGY

#1303, Digital Empire "B" Simin-daero 383, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do
14057 Republic of Korea